

業務用

LION

# ライオン業務用 手指衛生用オートディスペンサー

LHAD-TE500

軽量、コンパクト、シンプル  
衛生的で安心な施設環境づくりをサポート

## 1 タッチフリーで衛生的

センサー感知で液が自動吐出。  
いっさい手を触れず、すばやく  
薬液を手にとることができます。

## 2 コンパクト&シンプル

流線型のやさしい形状とコンパクトかつ  
モノトーンのシンプルなデザイン。  
診察室・病院、受付カウンターから飲食店・商業  
施設・ホテルの入り口まで、どんな場所にも  
置きやすく、なじみます。

## 3 簡単&安心機能


確認窓からボトルの薬液残量が一目でわかり、  
薬液切れを防止。  
また電池切れを防ぐ「お知らせランプ」※1つき。  
電池は引き出しタイプのトレーに入れて本体へ  
ワンタッチ装着。交換もとても簡単です。  
さらに本体は、いたずら防止のカギつきで安心。

## 4 どこでも設置が可能

据え置き※2でも壁づけでも対応でき、乾電池式※3  
でコンセントがないところでも設置可能。



※1：電池がなくなる前に、LEDランプが点滅でお知らせ。  
※2：トレーを付属。購入の手間や費用がいきりません。  
※3：電池は別売りです。

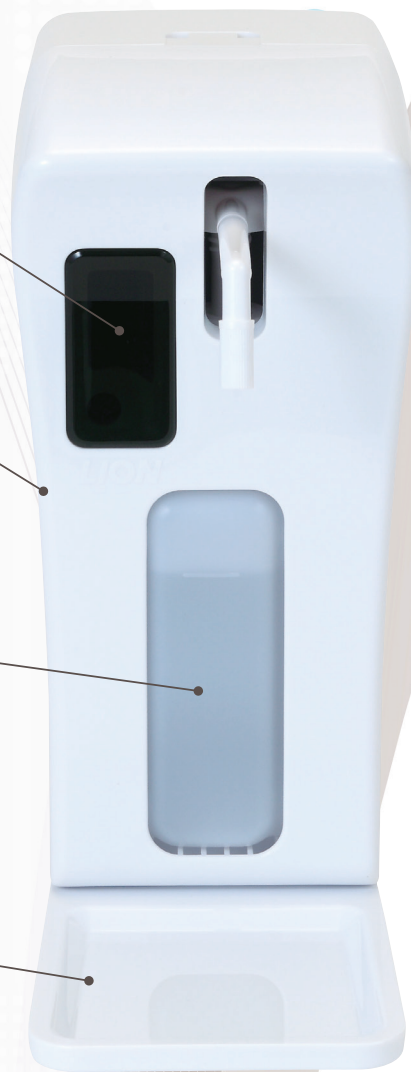

\*LHAD-TE500 本体に、薬液ボトルは含まれません。写真はイメージです。



500mL  
\*オートディスペンサー専用

専用液剤 | サニテートA ハンドミスト 指定医薬部外品


ウイルスをはじめ一般細菌に作用する手指消毒剤です。

- 速乾性手指消毒剤（液体）なので、作業がスムーズ。
- 保湿剤（グリセリン）配合。ベタつかずサラサラな使用感。
- すぐれた殺菌効果のベンザルコニウム塩化物配合。


ライオンハイジーン株式会社

オートディスペンサーの使い方


1 本体天面のカギ穴に付属品のカギを押し込む

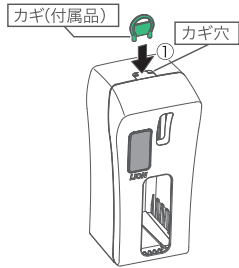


2 本体前面のカバーを開ける

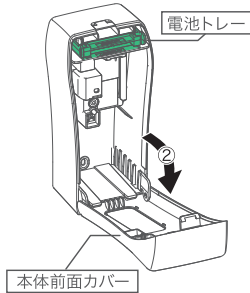


3 本体から電池トレーを引き出し、電池をセットする

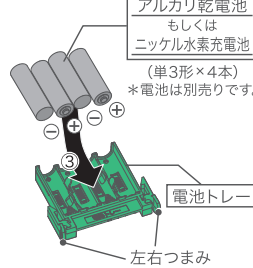

4 電池トレーを本体にセットする

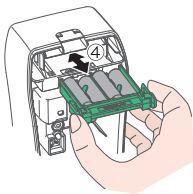

5 専用の薬液ボトルを設置する

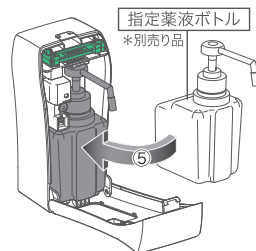

6 前面カバーを閉めて使用する



※手指消毒液が自動吐出することを使用者へ案内するピクトラベルを付属品に同梱しています。ご自由にご活用ください。

お知らせランプの説明




表示	説明
青色点灯	薬液吐出
赤色点滅	電池残量が少ない～電池切れ
赤青点滅	ノズル押し下げ異常

製品仕様

項目	内容
名称	ライオン業務用 手指衛生用オートディスペンサー
型番	LHAD-TE500
本体寸法	幅108×奥行100(底部)×高さ225mm
製品重量	約580g/本体のみ(梱包、付属品、ボトル・薬液を除く)
製品材質	前面カバー: PP / 本体: PP / 電池トレー: PP メカケース: ABS / 付属品トレー: PP
電源	アルカリ乾電池 単3×4本 ※本製品には付属していません
使用環境温度	5℃～40℃
使用環境湿度	20%～85%(結露なきこと)
対象薬液	当社指定の薬液(サニテートAハンドミスト)
付属品	トレー / カギ / 取扱説明書 / タッピングねじ / ピクトラベル

※本仕様は、性能向上などのため、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。

外観寸法図 (mm)

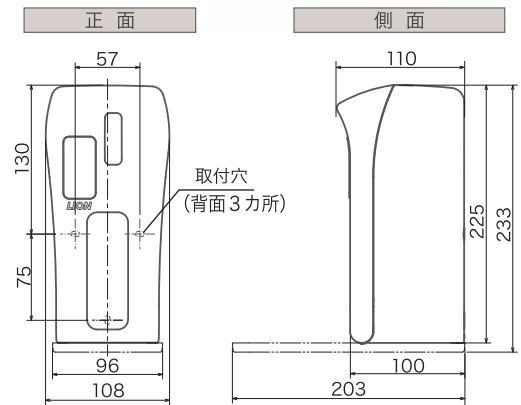

梱包内容

品名	容量	梱入数	寸法 (mm)		重量 (kg)		個装材質	JANコード
			個装	外装	個装	外装		
ライオン業務用 手指衛生用オートディスペンサー	—	1	—	幅 237 高さ 128 奥行 150	—	0.8	—	4903301280347
別売り品 サニテートA ハンドミスト*	500mL	6	幅 80 高さ 147 奥行 119	幅 270 高さ 183 奥行 261	0.5	3.6	ボトル : PE キャップ : PP, PE スプレー : PP, PE ラベル : PE 袋 : PP	4903301280330

※「サニテートA ハンドミスト 500mL」はオートディスペンサー専用製品ですが、設置せずにそのまま机上等に置いて使えます。

お問い合わせ先

ライオンハイジーン株式会社

本社：〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル6階  
☎03(5819)7770(大代表) <https://www.lionhygiene.co.jp/>

●このパンフレットは2018年10月現在のものです。  
一部商品仕様等に変更がある場合がございますが、ご了承ください。  
無断転載禁止! 他の印刷物やWEBサイトなどでの無断使用を禁じます。