

フドー® 紙おむつホルダーⅡ



NEW

おむつ外しなどを防止する紙おむつ専用ホルダー


5,280円 (税込)

4,800円 (税別)


- アイデアホックにより、軽度の不潔行為やおむつ外しを防止。
- ウエスト調整がしやすい構造。
- パンツタイプ・テープタイプの紙おむつ専用ホルダー。
- おむつの上から直接履けるよう腰回りはゆったりと設計。
- ハーフパンツタイプなのでムシにくく軽快な履き心地。




調整方法

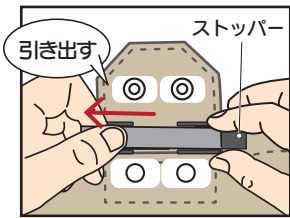


①バックルのストッパーを外側に倒し、ベルトを引き出す

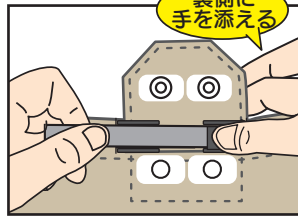

②位置が決まったらストッパーを内側に倒す
※反対側も①→②

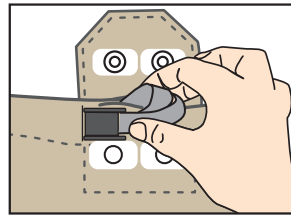

③引き出したベルトを収納ポケットに入れる

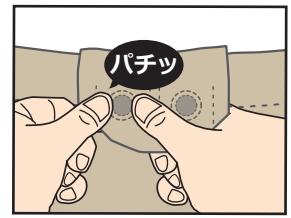

④あまぶたをアイデアホック(2つ)で閉じる

素材

本体生地: ポリエステル65%
綿35%


【洗濯上の注意】



- ホックおよびバックルは必ず“閉じた状態”で洗濯してください。開けたまま・外れたまま洗濯すると、ホックの磨耗やツメ折れによる故障の原因となります。
- 塩素系の洗剤、および漂白剤はご使用にならないでください。
- 洗濯後は形を整え、陰干しにしてください。
- アイロンをご使用の際にはあて布をしてください。

規格

胸回り(W)

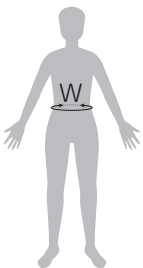

商品番号	規格 (胸回り)	販売単位	JAN CODE
105552	S (55cm ~ 68cm)	1枚	4958995855524
105553	M (67cm ~ 83cm)	1枚	4958995855531
105554	L (82cm ~ 98cm)	1枚	4958995855548
105555	LL (97cm ~ 113cm)	1枚	4958995855555



ご利用者本人やほかのご利用者の生命、または身体が危険にさらされる場合にのみご使用ください。
また、ご本人・ご親族の同意の上、正しくご使用ください。

「介護する方、介護される方がより快適に暮らせる環境をつくりたい」という想いのもと、開発されたのがフドー®シリーズです。



症状の違いや用途に応じて製品を取り揃えています。これらの製品は、ご利用者本人やほかのご利用者の生命、または身体が危険にさらされる場合にのみご使用ください。また、ご本人・ご親族等の同意の上、正しくご使用ください。

フドー®紙おむつホルダーについて

「フドー紙おむつホルダー」は、不潔行為やおむつ外しに対応するパンツタイプの紙おむつ専用のカバー（ホルダー）です。

この製品を開発したきっかけは、“認知症でおむついじりをする人に、当社の「スタイナーNo.700」という布おむつカバーを使用しているが、パンツタイプの紙おむつの上から使用するとムレしてしまう”というご意見からでした。

本来、パンツタイプの紙おむつにおむつカバーは必要ありませんが、おむついじりに対応するため、パンツタイプの紙おむつを使用してもムレにくい、この「フドー紙おむつホルダー」を開発しました。

おむついじりを軽減させたり、介助される方の不安を少しでもやわらげることで、そのような心配のある方にも、普通の洋服を着て散歩や買い物などをしていただきたい。そのような想いが「フドー紙おむつホルダー」には込められています。



フドー紙おむつホルダー




スタイナー No.700




フドー紙おむつホルダーⅡ

※「フドー®紙おむつホルダーⅡ」は、表から見えないアイデアホックを採用しています。

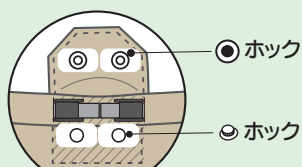

アイデアホック



ご本人では取り外しにくい特殊な構造のホック。さまざまな症状や自傷行為、抜管行為から身体を守ります。

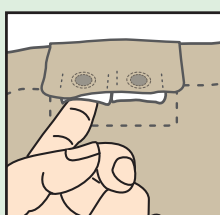

【外し方】

ホックの裏側に指を添え、あまふたの下のホックの上の指を入れ込み、爪を立てるようにして中央部を押してください。「パチッ」と音がしてホックが外れます。

※ホックの中央部および内部を、先の鋭いもので強く突かないでください。

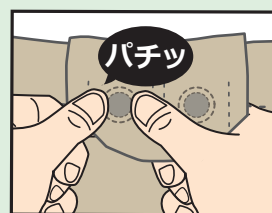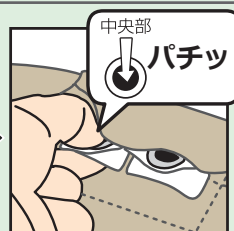

【閉じ方】

あまふたの上からホックのフチを両手で「パチッ」と音がするまで押します。



株式会社 **竹虎**®

<https://www.taketora-web.com/>

【ヒューマンケア事業部】

東日本 〒231-0011 神奈川県横浜市中区太田町2-23 観音メディアビジネスセンター8F
TEL. 045(680)0390 FAX. 045(680)0399

西日本 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町10-35 江坂南口第二ビル5F
TEL. 06(6386)7317 FAX. 06(6386)7389

取扱店