

ハッピーⅡNB 抑速ブレーキ

貸与 介護保険
適用
TAIS 00110-000119

製品安全協会
安全基準合格品
歩行車




ハッピーⅡNBにタイヤの急加速を抑える機能を搭載

82,500円 (税込)
75,000円 (税別)

抑速ブレーキ

下り坂で歩行車のスピードに追いつけない時でも、後輪の抑速ブレーキが歩行車の速度を自動で抑え、転倒する危険を回避します。

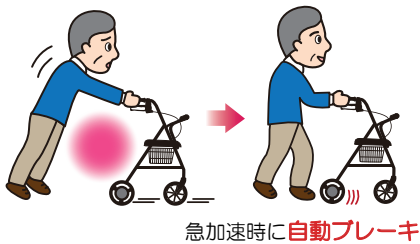

ブルーメタリック



握りやすいグリップ形状。
耐久性のあるブレーキユニットを採用。
↑ハンドブレーキ
↓パーキングブレーキ

78～87cm (5段階)



オレンジメタリック

50cm
(座面高)

62cm

57cm

抑速ブレーキセット



今までお使いのハッピーⅡNBに取り付けが可能な部品セットもご用意

41,800円 (税込)
38,000円 (税別)

| | |
|--------|---------------|
| 商品番号 | 117053 |
| JANコード | 4958995870534 |



バスケットを外して
ストラップを引くだけで
簡単に折りたためます。

折りたたみ時
※自立しません



43.5cm

OPTION オプション

外出先で杖も使いたい時などに便利な杖ホルダーを追加することができます。

タケトラ杖ホルダー
2,750円 (税込)
2,500円 (税別)



| カラー | ブルーメタリック | オレンジメタリック |
|--------|---------------|---------------|
| 商品番号 | 117007 | 117008 |
| JANコード | 4958995870077 | 4958995870084 |

| | | |
|--------------|---------------------------|--|
| 付属品 (最大積載量) | バスケット (5kg) | |
| 高さ / 横幅 / 奥行 | 78～87(5段階)×57×62cm | |
| 座面高 | 50cm (座面サイズ: 30.5×30.5cm) | |
| 折りたたみ時幅 | 43.5cm | |
| キャスター径 | 19cm | |
| 重量 | 8.9kg | |
| 材質 | 本体フレーム: アルミニウム 座面: PVC | |
| 最大使用者体重 | 100kg | |

MADE IN TAIWAN

発売元



株式会社 竹虎®

<https://www.taketora-web.com/>

【ヒューマンケア事業部】


東日本 〒231-0017 神奈川県横浜市中区港町 2-6-8 横浜関内ビル
TEL.045 (680) 0390 FAX.045 (680) 0399

西日本 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町 10-35 江坂南口第二ビル
TEL.06 (6386) 7317 FAX.06 (6386) 7389

取扱店


ハッピーⅡNB 抑速ブレーキの特長

従来の歩行車

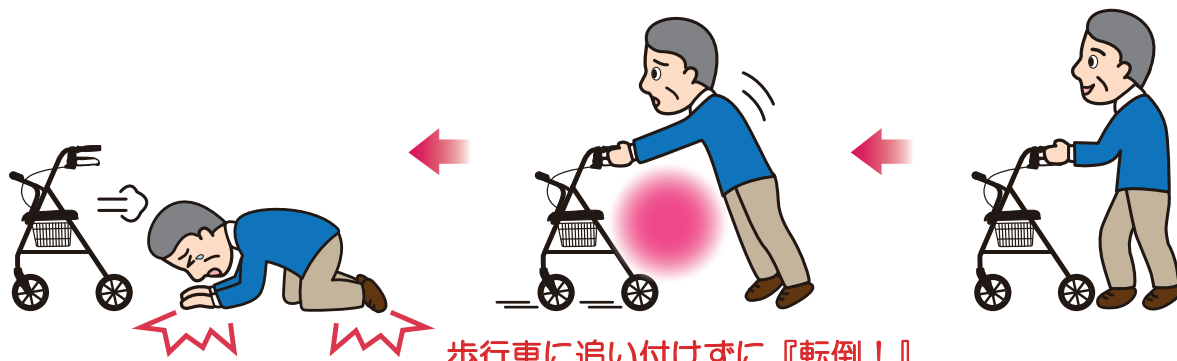

歩行車に追い付けずに『転倒!』

急加速時のみ作動する抑速ブレーキで安全な歩行を

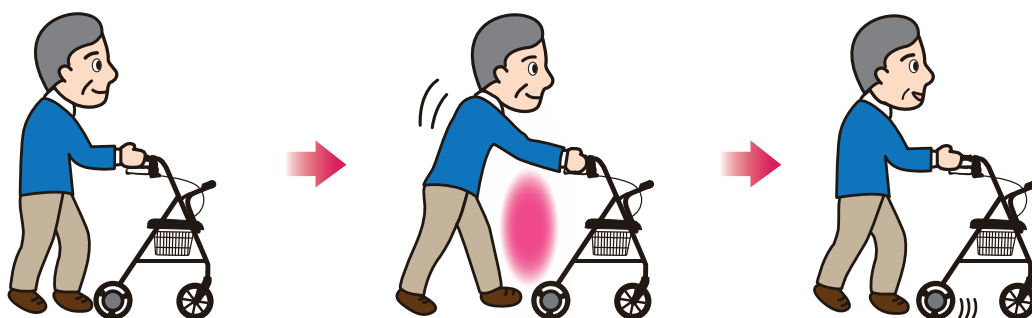

通常歩行時は軽～い歩行

急加速時に**自動ブレーキ**

安心・快適な自動ブレーキ構造

通常歩行時の速度ではブレーキはかかりません。急加速時にのみ抑速ブレーキが作動し、速度が上がりすぎるのを抑えます。

抑速ブレーキの再調整が不要


抑速ブレーキはブレーキ部品を車輪に内蔵しているため、ブレーキによるゴムタイヤの摩耗がなくブレーキ力を調整しなおす必要がありません。

ブレーキ力の設定が簡単

ご利用者様の歩行能力や住環境に合わせてブレーキ力を3段階に設定できます。六角レンチ1本で簡単にできます。

高い耐久性・耐摩耗性

抑速ブレーキの部品は耐久性・耐摩耗性が高く、交換時も一部のパーツで済むため、維持費・メンテナンス費が抑えられます。

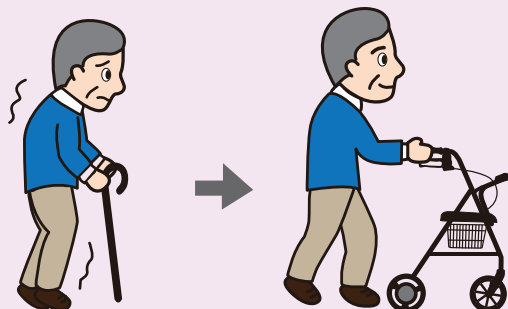


■歩行が安定しにくい方に

パーキンソン病の方などもしっかりと体重をかけられ、自動的に抑速ブレーキが作動しますので、立位がしっかりと保て、姿勢が良くなることのお声をいただいております。

■ハンドブレーキに苦勞される方に

握力が弱くハンドブレーキがおっくうで、歩行車での外出を諦めざるを得なかった方にもお使いいただけます。

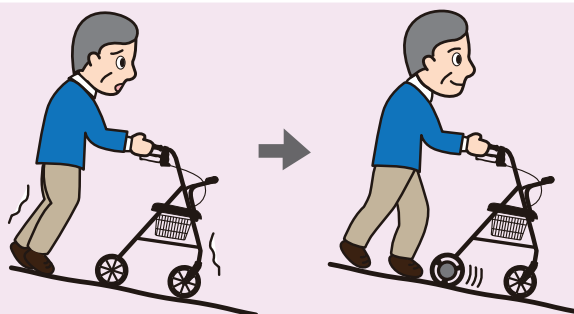

■坂道でお困りの方に

従来の歩行車は、下り坂をおりるときにはハンドブレーキをかけながら慎重に歩くものがほとんどでした。ハッピーⅡNB抑速ブレーキは体重をしっかりとかけても自動的に抑速ブレーキが作動して加速を抑えますので安心して歩行いただけます。

■ご自身も周りの方も心身の負担軽減を

抑速ブレーキのご利用により、安心・快適をもたらすことで一緒にリハビリに取り組まれるご家庭やセラピストの方々の介助負担を軽減できると考えています。