

エアマスター ネクサスR®							特許登録済
〈セット内容〉 ●専用マットレス (専用カバー付属) ●専用ポンプ	セット価格	172,000円(税抜)					192,000円(税抜)
	タイプ	840	900	840/SHORT	900/SHORT	900/LONG	1000
	品番	CR-660	CR-663	CR-665	CR-667	CR-669	CR-685
	TAISコード	00206-000082	00206-000083	00206-000084	00206-000085	00206-000086	00206-000087

エアマスター ネクサスR® プラス							特許登録済
〈セット内容〉 ●プラス専用マットレス (専用カバー付属) (プラス専用パッド付属) ●専用ポンプ	セット価格	192,000円(税抜)					212,000円(税抜)
	タイプ	840	900	840/SHORT	900/SHORT	900/LONG	1000
	品番	CR-671	CR-673	CR-675	CR-677	CR-679	CR-687
	TAISコード	00206-000088	00206-000089	00206-000090	00206-000091	00206-000092	00206-000093

専用マットレス (専用カバー付属)	単品価格	107,000円(税抜) ※専用カバー含む				127,000円(税抜) ※専用カバー含む	
	品番	CR-662	CR-664	CR-650	CR-668	CR-670	CR-686
	サイズ(幅×長さ×厚cm)	84×191×12	90×191×12	84×180×12	90×180×12	90×205×12	100×191×12
	重量(kg)	8.6	9.1	8.1	8.5	9.4	9.9
	材質	エアセル/ポリウレタンフィルム表面シボ加工 抗菌 ベースマット/三次元スプリング構造体プレスエアアー® 制菌 ヘッドアップセンサ/ABS樹脂 ベースシート/側面:ナイロンオックス、下面:ポリエステルメッシュ(すべり止め布付き) 抗菌					
	エアセル本数	24本	24本	22本	22本	25本	24本

プラス 専用マットレス (専用カバー付属) (プラス専用パッド付属)	単品価格	127,000円(税抜) ※専用カバー含む				147,000円(税抜) ※専用カバー含む	
	品番	CR-672	CR-674	CR-676	CR-678	CR-689	CR-688
	サイズ(幅×長さ×厚cm)	84×191×12 (足元のみ厚13cm)	90×191×12 (足元のみ厚13cm)	84×180×12 (足元のみ厚13cm)	90×180×12 (足元のみ厚13cm)	90×205×12 (足元のみ厚13cm)	100×191×12 (足元のみ厚13cm)
	重量(kg)	9.6	10.1	9.1	9.5	10.4	10.9
	材質	エアセル/ポリウレタンフィルム表面シボ加工 抗菌 ベースマット/三次元スプリング構造体プレスエアアー® 制菌 ヘッドアップセンサ/ABS樹脂 ベースシート/側面:ナイロンオックス、下面:ポリエステルメッシュ(すべり止め布付き) 抗菌					
	エアセル本数	24本	24本	22本	22本	25本	24本

専用カバー (専用マットレス付属品)	単品価格	7,800円(税抜) ※カバーのみの購入価格			9,800円(税抜) ※カバーのみの購入価格	
	品番	CH-662	CH-664	CH-650	CH-668	CH-670
	材質	ポリウレタンフィルムラミネート加工布 防水・透湿・制菌・伸縮・防炎				

プラス 専用パッド (プラス専用 マットレス付属品)	単品価格	20,000円(税抜)				
	品番	CR-659				
	サイズ/重量	幅60×長さ60×厚さ1cm/1.0kg				
	材質	カバー/ポリウレタンフィルム表面シボ加工 抗菌 中身/ポリエステル100% コントローラー/ABS樹脂				
	その他	定格/AC100V,40W,50/60Hz ACコード長さ:4m				

専用ポンプ	単品価格	65,000円(税抜)				
	品番	CR-661				
	サイズ/重量	幅36.5×高さ23.5×奥行8.7cm(ポンプフック装着時/幅36.5×高さ26.5×奥行15.7cm)/3.5kg				
	材質	ケース/ABS樹脂、フック/POM樹脂				
	その他	定格/AC100V,10W,50/60Hz ACコード長さ:4m				

※マットレスのサイズ表示は基本寸法であるため、マット内圧の状態やご使用状況により多少異なる場合があります。

マットレス、エアポンプ：3年間保証    プラス専用パッド：1年間保証

ポンプを床に立てて設置する際は  
専用スタンド(別売)をご使用ください。  
単品価格：1,000円(税抜)



LOVING CARE  
**CAPE** 商品に関する詳しい情報は、ケーブのホームページをご覧ください。  
ホームページ <http://www.cape.co.jp/>

\*介護保険における福祉用具の貸与に関しては、居宅介護支援事業者等までお問い合わせください。  
\*エアマスターネクサスR®、エアマスターネクサスR®プラスの取り扱いにあたっては付属の取扱説明書をよく読んでご使用ください。  
\*製品の仕様・価格は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。  
\*印刷の関係で実物とは色が違うことがあります。  
\*本カタログ掲載内容及び写真・イラストの無断転載は固くお断りします。

■製造販売元 **株式会社 ケーブ**

本社 / 〒238-0013 神奈川県横須賀市平成町2-7  
TEL:046-821-5511(代) FAX:046-821-5522  
E-mail:lovingcare@cape.co.jp

福岡営業所 / 〒812-0006 福岡県福岡市博多区上牟田2-7-1  
TEL:092-431-0885 FAX:092-431-0889

お問い合わせ先

体圧分散式エアマットレス/床ずれ防止用具  
交換(リプレースメント)タイプ



高機能型エアマットレス

エアマスター ネクサスR®

エアマスター ネクサスR® プラス

Ag+  
AIR MASTER  
NEXUS R  
840

LOVING CARE  
**CAPE**  
ゼロ  
褥瘡0をめざして



当社最薄  
8.7 cm


旧ネクサスから約50%のスリム化に成功。

ワンタッチで使用できる“かんたんモード”を搭載。  
幅広い療養者や状態の変化に対応できる「NEXUS」の進化系、  
高機能型エアマットレス「NEXUS R®」誕生。

かんたんモード

かんたんモードでは、エアマット利用者の半数以上を占める40~60kgの方に対応

当社調査の結果、半数以上（約60%）の方が体重40~60kgであることがわかりました。  
そこで、体重40~60kgの方であれば、ワンタッチで自動に内圧調整ができる“かんたんモード”を搭載。  
さらに便利に使いやすくなりました。

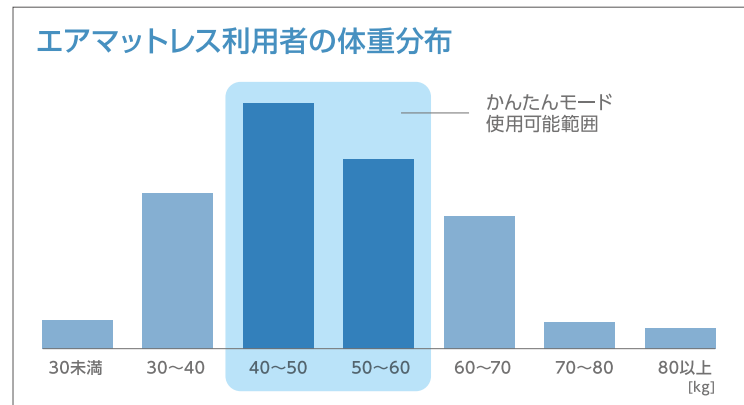


**体重設定機能**

療養者の体重に応じて細かく設定できる「体重設定」機能もあります。体重設定機能は全ての体重の方にご使用可能です。

体重設定は、**20~120kg** で設定できます。

予防目的から重度の方まで、幅広い状態の方々に対応

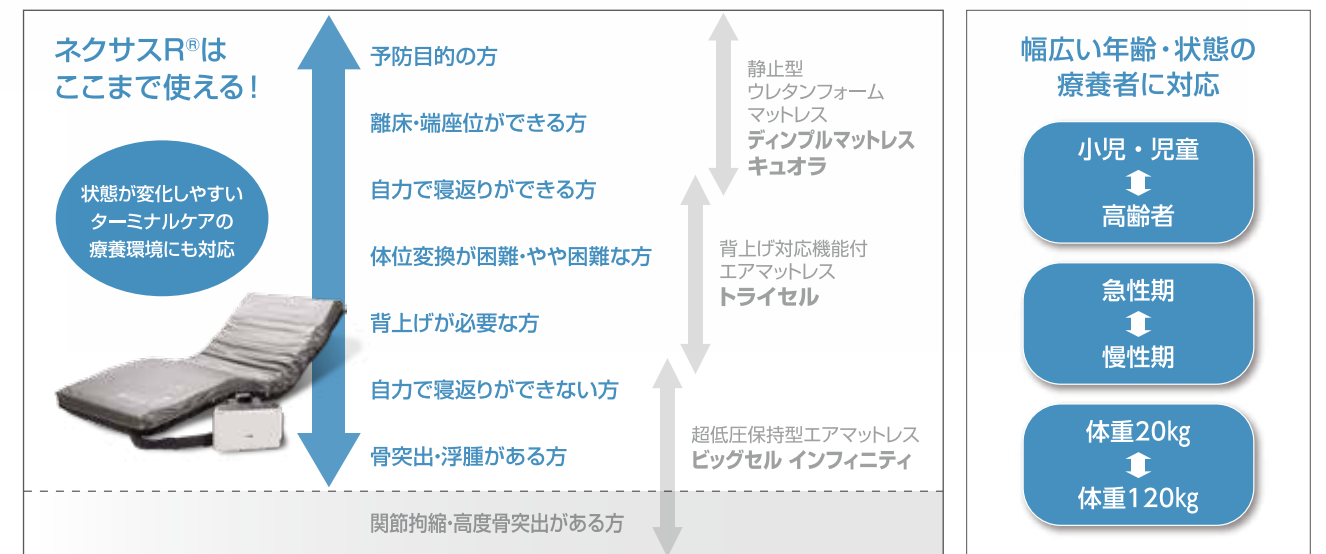

幅広い年齢・状態の療養者に対応

- 小児・児童 ↔ 高齢者
- 急性期 ↔ 慢性期
- 体重20kg ↔ 体重120kg



# 快適と安全を追求した多彩なモードを搭載。


 **自動ヘッドアップ** 特許取得済

## 背上げをして過ごされる方に

マットレスに内蔵したセンサがヘッドアップ角度を検知。角度に応じて、マットレス内圧と動きを最適な状態に自動調整します。

### POINT

- ✓ 4段階制御
- ✓ 全てのベッドに適用

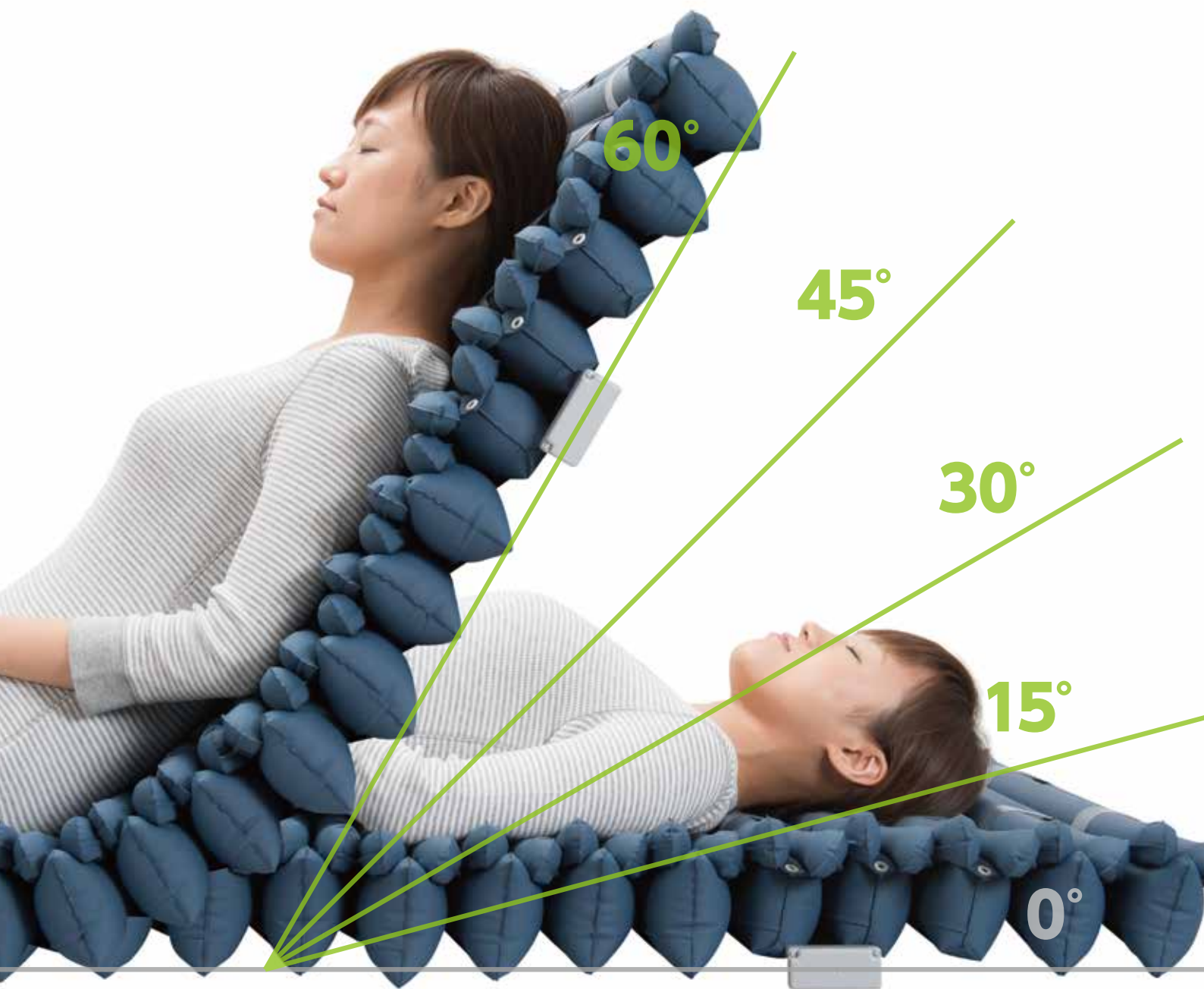

 **ムレ対策機能** 特許取得済


独自の換気システムで快適な寝床内環境に強・弱と2段階に切替えが可能で、療養者の状態に合わせた調整に対応します。さらに、ブレスエアーを採用することで、マットレス全体が呼吸する独自の構造で快適な寝床内環境を保ちます。

## 三次元スプリング構造体 “ブレスエアー®”




通気性 : 温度上昇が少なくむれにくい  
 透水性 : 丸洗い可能  
 制菌性能 : SEK 赤ラベル認定  
 耐久性 : 8万回繰り返し圧縮にも耐え、へたりにくい

## ムレ対策の有効性

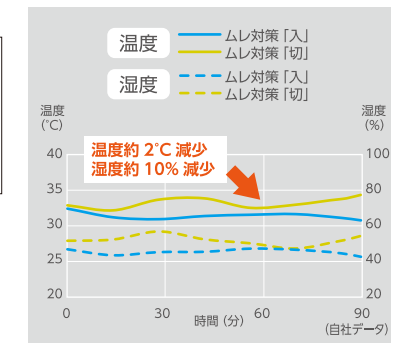

## マットレス全体が呼吸する構造

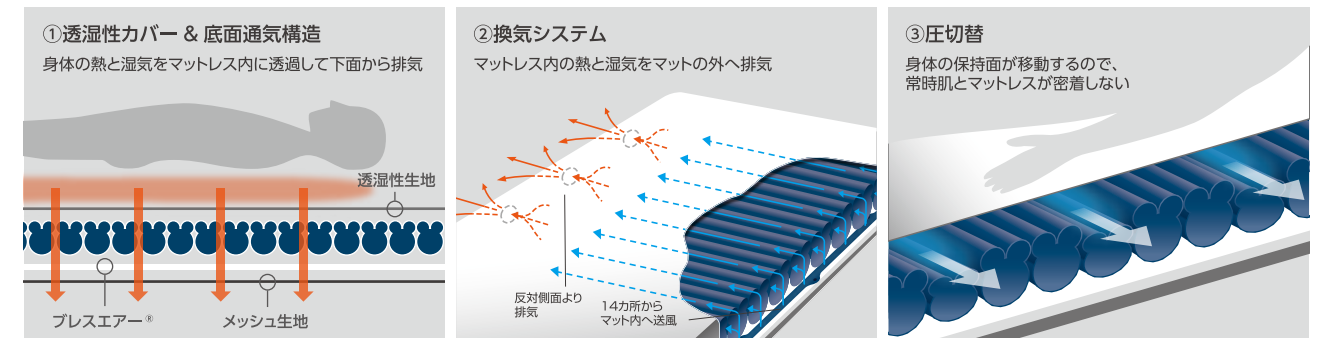

 **クイックハードモード**


マットレス上でのケアや離床時などに約3分で全てのエアセルの内圧を高めて静止します。安定床面が必要なシーンに迅速に対応します。1時間オートオフ機能付き。



離床、端座位、リハビリ時などに安定した床面を確保できます。保持力のあるデュアルフィットセル®との相乗効果により、体位変換やポジショニングが楽に行えます。

 **微波動モード** 特許取得済

安静管理が必要な方に通常モードより膨張収縮の動作を小さくし、圧切替え時の違和感を軽減。ターミナルケアの方にも、安心してお使いいただけます。

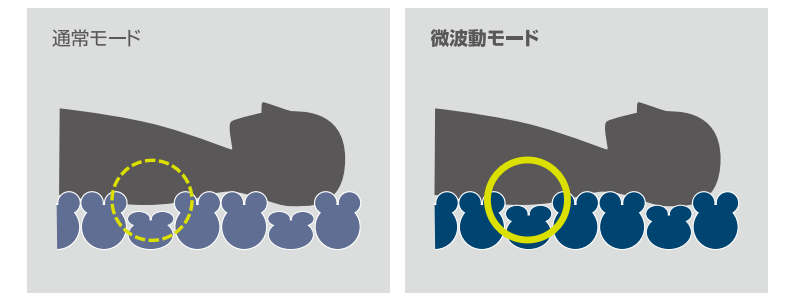

寝心地のよさと体圧分散を両立できます。




## 多彩な機能でQOL向上を実現したマットレス。



### 寝心地や快適さを考慮したデュアルフィットセル® (上層分離型二層式エアセル\*)

特許取得済

ひとつのセルに小さなセルがふたつ付いている“デュアルフィットセル®”は、ずれを吸収し、体の凹凸にしなやかにフィットします。きめ細かな体圧分散と安定感の両立を可能にしました。

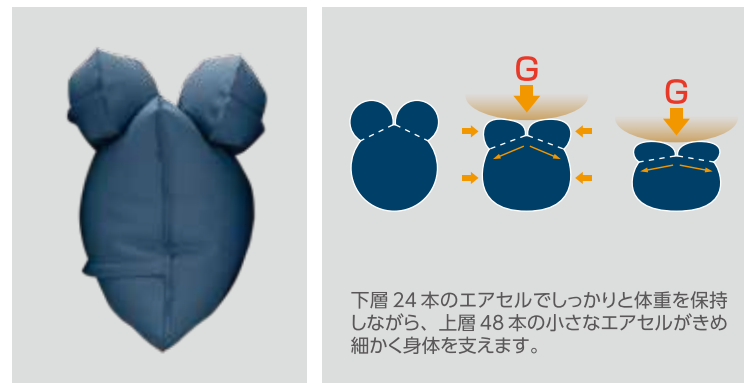

※日本褥瘡学会の褥瘡予防・管理ガイドライン(第4版)に寝心地や快適さを考慮した体圧分散マットレスとして、上層分離型二層式エアマットレスが追加されました。

### 高性能な専用カバー

防水、透湿、制菌 (SEK 赤ラベル相当)、  
防炎機能を備えたカバー



伸縮性カバー ※Ag+・・・銀複合系抗菌剤を使用しています。

## その他の機能も充実。

### エアセルは交換可能



エアセルの破損時には、1本ずつ交換が可能です。

### 場所をとらない収納



エアを抜けばコンパクトに折りたたむことができます。

### スリム設計




従来品と比べ、よりスリムになりました。

## 充実した安全機能。

### 光サイン


視認性の高いデザインの光サインと警告音機能を搭載。動作状況が一目で分かり、異常時には赤ランプと警告音でお知らせします。

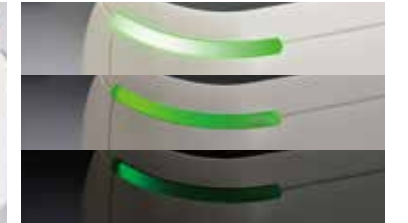

自動調光 (3段階)

### 厚さ12cm

高性能マルチタイプエアマットレスで最薄の12cm。ベッド柵を効果的に使用できます。

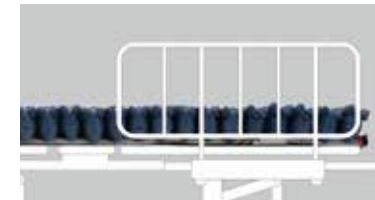

### 停電対策 / メモリ機能

停電と同時に特殊なバルブがエアセル内の空気漏れを自動で遮断。マットレス全体の内圧を約14日間保持します。電源プラグの抜き差しを行った場合も、直前の設定が自動復帰します。



停電対策機能付き



メモリ機能

### CPR対応機能

カプラーを外して約25秒で安定した床面の確保ができるため、心肺蘇生などの際に、迅速な対応が可能です。



### キーロック

お子様や認知症の方などによる誤操作を防止します。



### エコモード



コントロールパネルを消灯することで消費電力を節減します。

### プラス専用パッド仕様



プラス専用パッドは、ベースマットの下にセットします。

### エコモード



コントロールパネルを消灯することで消費電力を節減します。

### プラス専用パッド仕様



※ネクスサスRプラスの機能です。

### マットレス内のひえを防ぐ



※身体を温めるための暖房機能ではありません。\*所定以外の場所には取り付けないでください。

### 温度調整用コントローラー



温度調整用コントローラー