

# ユニ・チャーム N95マスク



小さめサイズ



ふつうサイズ



衛生的な個包装タイプ

## 米国NIOSH規格認証(米国労働安全衛生研究所) N95

品番：SNF-M01 規格：TC-84-9252

### 遮断性と息のしやすさの両方を実現

- ・顔の形に合わせてピッタリフィット
- ・フィルター面積が広いので、通気性に優れ息がしやすい

### ASTM規格 レベル1 に準拠したフィルター性能

|                                       | 検査項目               | 結果           | ASTMF2100-20<br>レベル1 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------|----------------------|
| 医療用マスク<br>ASTM-F2100-<br>20<br>レベル1準拠 | 微粒子捕集効率 (PFE)      | 99 %         | ≥95 %                |
|                                       | バクテリア飛まつ捕集効率 (BFE) | 99 %         | ≥95 %                |
|                                       | 呼気抵抗               | 2.1 mliO/cm2 | <5.0 mliO/cm2        |
|                                       | 血液不浸透性             | 80 mmHg      | 80 mmHg              |
|                                       | 延焼性                | Class1       | Class1               |

※ASTM F2100-20:Standard Specification for Performance of Materials Used in Medical Face Mask.2020

### 折り畳み式なので省スペースで保管可能

### 安心・安全の日本製

# 使用方法のポイント

動画でチェック!



あて方動画はこちら

本マスクは使用方法を誤ると、病気や感染にかかるリスクを完全に回避することはできません。ご使用前に必ず、パッケージの「使用上の注意」を読み、お使いください



**ノーズクランプ側を上にし、マスクを上下に開きノーズクランプを鼻に合うように軽く曲げます。**



**マスク下側を顎にかけます。2本のゴムの中央を持ち、頭の後ろへ持っていきます。**



**マスクの上側は頭頂部に、下側は首に固定します。**



**スキマができないように、鼻とアゴを確実に覆い、ノーズクランプは両手の指で押し付け顔に密着させて下さい。**



**モレやすい箇所：①鼻周り ②顎周りで息の漏れがないか、マスクに手をあてて息を吸ったり吐いたりして、スキマがないかチェックして下さい。**

**⚠️ マスクが密着されているか、必ず確認お願い致します。**

| 商品コード | 商品名                        | 入数  |     | JANコード        |
|-------|----------------------------|-----|-----|---------------|
|       |                            | 箱   | ケース |               |
| 56676 | ユニ・チャーム<br>N95マスクふつうサイズ50枚 | 50枚 | 10箱 | 4903111566761 |
| 52480 | ユニ・チャーム<br>N95マスク小さめサイズ50枚 | 50枚 | 10箱 | 4903111524808 |

※動画視聴には、パケット通信料がかかります。※iphone、ipad およびAndroidスマートフォンからの視聴を推奨いたします。端末によってはQRコード読み取りおよび動画再生できない場合があります。

※本動画は、端末へのダウンロード保存はできません。※本動画は予告なく終了する場合または内容が変更になる場合があります。