

介護職員さんの腰痛予防と利用者様の苦痛軽減

力まかせ・抱きかかえ介助の見直しに。

福祉用具貸与品

ベッドの上での体位変換などの移動介助に

## 新・寝返りシート



新・寝返りシートは、自ら寝返りできない方に、痛みや苦痛を与えずに体位変換を行うための介助用具です。介助者の腰への負担と、被介助者の苦痛を軽減します。



### 【使用目的】


- ・寝返りをさせる時、スペースを広げる為に横移動を行う際に、介助者、被介助者どちらにも、負担、苦痛をかけずに移動が出来ます。
- ・被介助者の床ずれ部分を引きずる事が無いので、悪化の防止となります。

### 【使用方法】

ツルツルした面を下側にしてご使用下さい。

「寝返りシート」はエアーマットや、除圧マットのシートの上に敷きます。

更にその上に防水シートを敷いてご利用下さい。

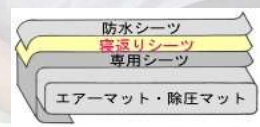

### 【ワンポイントアドバイス】

- 1.手前に移動する様に動作します。その際には摩擦が大きい「頭、背中、お尻」が必ず「寝返りシート」に入った状態をご利用下さい。

### ×力まかせの寝返り



従来の力任せの寝返りは介助者の腰への負担と、被介助者にとっても苦痛を伴います。時には床ずれの悪化の原因になる事があります。

持ち上げ介助ゼロ

検索

YouTube  
動画でチェック!



【素 材】表面素材:ポリエステル 65% 綿:35%  
裏面素材:ポリエステル 100%

【サイズ】:1100×1500mm

商品名:新・寝返りシート (ワイドタイプ)

用 途:自ら寝返り、体位変換できない方のための「負担・苦痛のない介助をめざす」シート。

効 果:抱きかかえ・力まかせの介助からの介助者の負担・被介助者の苦痛の軽減。

標準価格 18,700円 (消費税込)

型 番:AKN-0503

TAISコード:01341-000004

開発製造販売元 株式会社あかね福祉

TEL024-937-5022