

# ハッピーミニトール抑速ブレーキ

貸与 介護保険  
適用  
TAIS 00110-000132

製品安全協会  
安全基準合格品  
歩行車




**NEW**

## ハッピーミニトールに急加速を抑える機能を搭載

### 抑速ブレーキ (タイヤの急加速を抑える機能)

下り坂で歩行車のスピードに追い付けない時でも、後輪の抑速ブレーキが歩行車の速度を自動で抑え、転倒する危険を回避します。

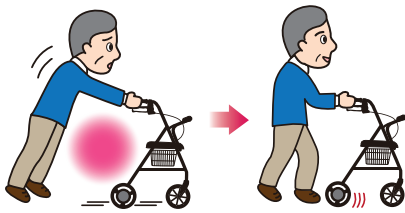

急加速時に自動ブレーキ

88,550 円 (税込)

80,500 円 (税別)



握りやすいグリップ形状。  
耐久性のあるブレーキ  
ユニットを採用。

↑ハンドブレーキの方向  
↓パーキングブレーキの方向



バスケットを外して  
ストラップを引くだけで  
簡単に折りたためます。



ダークグレーメタリック

**OPTION**  
オプション

外出先で杖も使いたい時などに便利な"杖ホルダー"を追加することができます。

タケトラ杖ホルダー  
3,080 円 (税込)  
2,800 円 (税別)



カラー	ダークグレーメタリック
商品番号	117073
JAN コード	4958995870732
付属品 (最大積載量)	バスケット (5kg)
高さ / 横幅 / 奥行	72 ~ 86(7段階) × 51 × 60.5cm
座面高	45cm (座面サイズ: 28 × 28cm)
折りたたみ時幅	39.5cm
キャスター径	19cm
重量	8.6kg
材質	本体フレーム: アルミニウム 座面: PVC
最大使用者体重	80kg

MADE IN TAIWAN



<https://www.taketora-web.com/>

**【ヒューマンケア事業部】**

東日本 〒231-0011 神奈川県横浜市中区太田町2-23 観メディアビジネスセンター8F  
TEL. 045(680)0390 FAX. 045(680)0399


西日本 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町10-35 江坂南口第二ビル5F  
TEL. 06(6386)7317 FAX. 06(6386)7389

取扱店

# ハッピー “抑速ブレーキ” で安心・快適



歩行車に追い付けずに『転倒！』の不安を感じていたら…

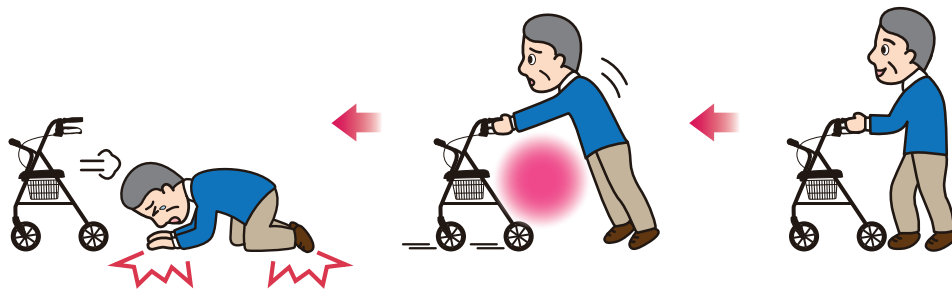

## 急加速時のみ作動する抑速ブレーキで安全な歩行を



急加速時に**自動ブレーキ**



通常歩行時は軽～い歩行

### 安心・快適な自動ブレーキ構造

通常歩行時の速度ではブレーキはかかりません。急加速時のみ抑速ブレーキが作動し、速度が上がりにすぎると抑えます。

### ブレーキ力の設定が簡単

ご利用者様の歩行能力や住環境に合わせてブレーキ力を3段階に設定できます。六角レンチ1本で簡単にできます。

### 抑速ブレーキの再調整が不要

抑速ブレーキはブレーキ部品を車輪に内蔵しているため、ブレーキによるゴムタイヤの摩耗がなくブレーキ力を調整しなおす必要がありません。従来のような左右のブレーキ力の同調も不要です。

### 高い耐久性・耐摩耗性

抑速ブレーキの部品は耐久性・耐摩耗性が高く、交換時も一部のパーツで済むため、維持費・メンテナンス費が抑えられます。


## こんな方にオススメ

### ■歩行が安定しにくい方に

パーキンソン病の方などもしっかりと体重をかけられ、自動的に抑速ブレーキが作動しますので、姿勢が良くなるとのお声をいただいております。

### ■ハンドブレーキに苦勞される方に

握力が弱くハンドブレーキがおっくうで、歩行車での外出を諦めざるを得なかった方にもお使いいただけます。

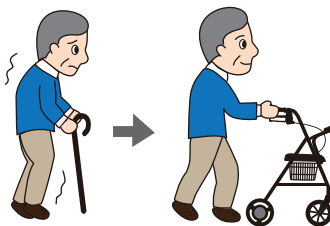

### ■坂道でお困りの方に

ハッピー“抑速ブレーキ”は体重をしっかりとかけても自動的に抑速ブレーキが作動して加速を抑えます。



## 発売中

貸与  
介護保険  
適用



### ハッピーⅡ トール抑速ブレーキ

TAIS 00110-000130

90,750円 (税込) 82,500円 (税別)



▲詳細はこちら

### ハッピーⅡNB 抑速ブレーキ

TAIS 00110-000119

90,750円 (税込) 82,500円 (税別)



オレンジ  
メタリック

### ハッピーミニ 抑速ブレーキ

TAIS 00110-000129

88,550円 (税込) 80,500円 (税別)



ミルクティー  
パーズ