



座位保持具

## 安全一番

着座者本人による着脱が可能のため、拘束になりません。



### 特徴

- ① 自立支援用具。車いすからのズレ落ち防止。保持安全性の向上。
- ② 着座者本人による自由な締め付け介助操作を可能にしたため、不本意な身体拘束によるストレスからの開放。
- ③ 下腹部取付の為、運動能力制限無し。
- ④ クッション性のある座布団使用。
- ⑤ 体型に関わらず万能型。
- ⑥ 取り付け・取り外し簡単。洗濯可能。
- ⑦ 食べこぼし等の汚れ防止。撥水加工で清潔維持。



適合車いす：自走型、介助型、リクライニング型  
(座幅380～420mm)  
\* 背張り調整型、肘付き食堂椅子にも対応


安全一番

検索




### 車いすへの取付方法

- ① 座面は前方・後方のパイプ4箇所と後部中央のヒモをXフレームへ結ぶ。

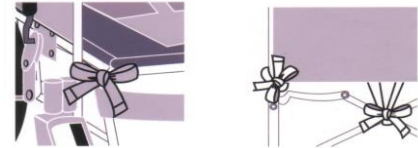

- ② 背もたれに【A】マジックファスナー式ベルトを正面から取付。折り返しが見える様にします。【B】Y字のマジックベルトを貼り付けします。

### 本人の使用方法

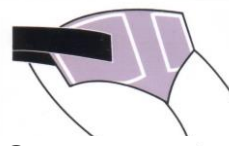

- ① 右側固定



- ② 左側固定

Y字になったマジックベルト【B】方式で、片手で簡単に着脱できます。

YouTube  
動画でチェック!



【商品名】  
座位保持具《安全一番》

TAIS 01341-000002

【開発製造販売元】  
株式会社あかね福祉  
TEL024-937-5022

希望価格18,700円(消費税込)



4562147680126