

# コンパクトタイプ シルバーカー キャリアースルーン



キャリアースルーンの商品動画はこちらから



## 段差らくらく！ 進化したやさしさ 「段差スルー機能」搭載！

特許第4344655号



キャリアースルーンには、  
やさしい機能をたっぷり詰め込みたいから

独自開発した「段差スルー機能」を搭載した「キャリアースルーン」は  
すぐれた走行安定性と車体の軽量化を同時に実現しました。  
ショッピングでも、お散歩でも、どこにでもお供をする  
あなたの新しいパートナーです。



1 補助輪が路面の段差(3cmまで)をとらえます。

2 補助輪が前に進み、前輪が後方へ移動します。

3 前輪がもとに戻ります。

4 スムーズに段差を通過します。



バリアフリーが進んだ現在でも、路上には小さな段差がたくさんあります。たとえば横断歩道と歩道の段差は標準2cm。小型・軽量化が進んだシルバーカーでは、わずか1cmの段差でもつまずいてしまうのが実態です。キャリアースルーンの「段差スルー機能」なら困った段差があっても、キャリアーをそのまま押すだけで、3cmまでの段差ならスルーンとラクラク通過することができます。



## カンタン操作で便利さUP


### 折りたたみラクラク。バッグの荷物はそのまま

どなたでもカンタンな手元操作で前後に小さく折りたためます。バッグの中身を取り出す必要はありませんので、階段やエスカレーターでの持ち運び、待合室などで大変便利です。



### 身長の高い方にも安心。業界初！ハンドル高さ1mを実現

ハンドルの高さは、80cmから100cmまで、20cmの調節を可能にしました。5cmきざみで5段階の設定ができますから、女性でも男性でもお好きな高さをお選び頂けます。

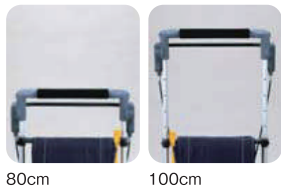

## 軽い・安全・使いやすい

### 独自開発の手のひらグリップ

手のひらにフィットするグリップ形状。すべりにくく、ラクに握れて、ラクに歩けます。




### 使いやすいハンドブレーキ

ハンドルを握ったままで、指をのばせば届くハンドブレーキ。軽い力で速度調節もできますから、急な下り坂でも安心です。また、ハンドブレーキを下に倒せば、駐車用ブレーキになります。



### 座席つきなのに軽い車体

座席シートを前に倒すだけで、どこでも椅子に早変わり。座席つきでも重量3キロ台の軽さを実現しました。

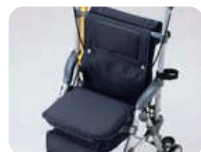

## 歩行時の安全のために

### 4つの反射板

手元に2カ所、正面に2カ所の計4カ所に、暗い道でも認識しやすい反射板がついています。雨の日や暗い道でも、照明があたると白くひかります。



## 「あると便利」を装備しました

### 傘立て&杖立て



※写真の商品はキャリースルーンNとなります。

## 【前輪】方向転換もスムーズでらくらく

### 前輪は自在キャスター

前輪はタイヤの向きが自由に変わります。また、タイヤの方向をロックすれば、直進走行性がよくなり坂道などでもしっかり歩けます。



スーパーなどの狭い通路でもラクラク!



前輪をロックすればまっすぐスムーズ!

## 【後輪】制動オイルダンパー搭載

### 坂道でも安心、ゆっくり回る車輪

後輪には制動オイルダンパーを搭載。オイルの力でタイヤをゆっくり回してスピードを制御します。車体が軽くても、歩行ペースにあわせて滑らかな安定した歩行ができます。(XLタイプのみ)

