

取扱説明書

このたびは助聴器 聽七郎 (HA7)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この製品は普通の声が聞きづらい方のための“聴こえ”を補う機器です。医療機器にあたる補聴器とは異なります。
この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取扱い方法を示しています。ご使用になる前に、
この取扱説明書をお読みください。

お読みになった後はいつでも見られるところに必ず保存してください。


警告表示の意味

取扱説明書では、次のような表示をしています。

安全にお使いいただくために、表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。




この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

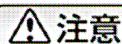

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

⚠ 警告

- ①お子様や幼児の手の届く所で保管しないでください。誤って部品を飲み込むと大変危険です。
- ②他社の補聴器を付けたまま、その上に補聴器を使用しますと、「ピー」というハウリング音が発生しやすく、耳を害するおそれがあります。おやめください。
- ③音量調節付スイッチを「中」または「大」の状態で耳元に近づけると、「ピー」というハウリング音が発生し、耳をいためることができます。使うときは、音量調節付スイッチを「小」の状態にして、耳に当てるから音量を設定してください。
- ④レシーバー部分を耳に当てるときスイッチが入ります。レシーバー部分と耳との間に隙間があると、「ピー」というハウリング音が発生し、耳をいためることができます。耳にピッタリ当てるご使用ください。
- ⑤マイク部分は手で覆わないようにしてください。覆いますと、「ピー」というハウリング音が発生し、耳をいためることができます。ご注意ください。

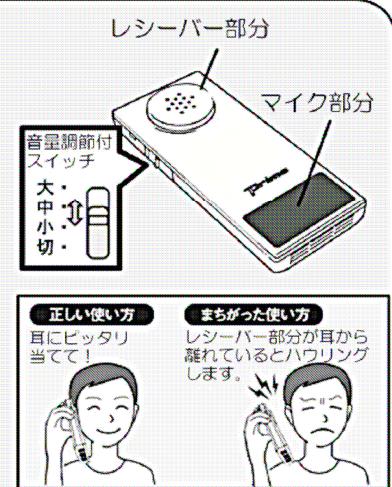**⚠ 注意**

- ①長時間使用しないときは、電池を本体から取り出してください。電池から液が漏れて故障の原因となります。
- ②精密機器ですので、落としたり衝撃を与えると故障する場合があります。落としてしまう場合は、内部には触れないでください。
- ③落下などで破損した場合は、内部には触れないでください。
- ④分解、改造しないでください。
- ⑤水や海水などの液体で濡らさないでください。
- ⑥付属の乾電池はお試し用ですので、早めに切れることができます。