

## ■使用上の注意

### ガウン

- ・ディスポーザブル用品です。再使用しないでください。
- ・使用後は衛生的に処理してください。

### マスク

- ・有害な粉塵やガス等が発生する場所やそれを防ぐ目的では使用しないでください。
  - ・使用中にかゆみ、かぶれ、発疹などの異常を感じた場合はただちに使用を中止してください。
  - ・肌に合わない時または装着部位に傷やはれもの等がある時は使用を中止してください。
  - ・使用中に臭いで気分が悪くなった場合は、ただちに使用を中止してください。
  - ・乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
  - ・ディスポーザブル用品です。洗濯は避けてください。
  - ・火のそばに置くと軟化し、変形・引火のおそれがありますので絶対におやめください。
  - ・使用後は衛生的に処理してください。
  - ・装着方法をよく読み、正しくご使用ください。
- ※マスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。

### キャップ

- ・ディスポーザブル用品です。再使用しないでください。
- ・使用後は衛生的に処理してください。

### シュー カバー

- ・ディスポーザブル用品です。再使用しないでください。
- ・使用後は衛生的に処理してください。
- ・商品の劣化が発生しますので、殺菌灯付きロッカー・蛍光灯の近く・直射日光など、紫外線が強くあたる場所には保管しないでください。

### グローブ

- ・ディスポーザブル用品です。再使用しないでください。
- ・体質的に手に湿疹、カブレ等の出来やすい方は使用しないでください。
- ・使用中に異常を感じた場合は、使用を中断し医師に相談してください。
- ・本品に破損、変形、ピンホール等の異常が認められる場合は使用をしないでください。
- ・手術用、検診用としてのご使用は避けてください。
- ・本品は薄いため、熱・熱湯等の熱源に触ると火傷の恐れがありますので注意してください。
- ・刃物、金たわし等の鋭利なもので傷をつけると、切れやすくなりますので注意してください。
- ・油・溶剤が付着しますと切れやすくなりますので注意してください。

## ■「品質合格証」封入について

本製品に、「品質合格証」が封入されています。中国国内で新型コロナウイルス騒動に便乗した粗悪品を製造する工場が増加しており、中国政府はマスクやガウン等の医療消耗品に厳しい輸出制限を実施しております。この規制を受け、日本国内へ商品の円滑な輸入を行うために、品質合格証が商品に封入される事になりました。

### (非医用)表記について

中国における(非医用)とは手術処置以外で使用する材料のことを示します。従いまして(非医用)という表記においても、今まで通り日本国内の医療現場で安心してご使用いただける品質です。

発売元



URL <http://taketora-web.com/> E-mail [info@taketora-web.com](mailto:info@taketora-web.com)

ヒューマンケア事業部

東日本 西日本 TEL045(680)0390(代)  
TEL06(6386)7317(代)

編集協力

公益財団法人  
日本訪問看護財団

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 5-8-2  
日本看護協会ビル 5F  
TEL 03-5778-7001 FAX 03-5778-7009

# 感染防護基本セット取扱説明書



\*本製品を正しくお使い頂くために、ご使用前に必ず、この『取扱説明書』をお読みください。

\*内容をご理解頂き、記載事項をお守りください。

\*本セットはスタンダードプリコーション(標準予防策)に基づいた個人防護具(PPE)が一通り揃っていますが、対象の方の状態に応じて使用する製品を組み替えてご使用ください。



使い方はこちら

## ■セット内容

### ●1包内容

- ・ガウン 1枚
- ・シールド付きマスク 1枚
- ・キャップ 1枚
- ・シュークリーバー 2枚
- ・グローブ 2枚
- ・商品パッケージ 兼廃棄袋

## ■本製品の特長


### ●訪問看護師等の医療従事者や介護者を感染性物質

(血液や飛沫など)から保護する個人防護具(※PPE)です。

### ●コンパクトで持ち運びに便利、ひと袋で医療機関などで求められる安全性の高い水準で感染対策が可能です。

#### 【こんな時にご使用ください】

- ・訪問診療や往診時に
- ・外来時に
- ・訪問看護や訪問介護の時に
- ・ご家族の感染時
- ・災害時や感染蔓延時の備蓄に

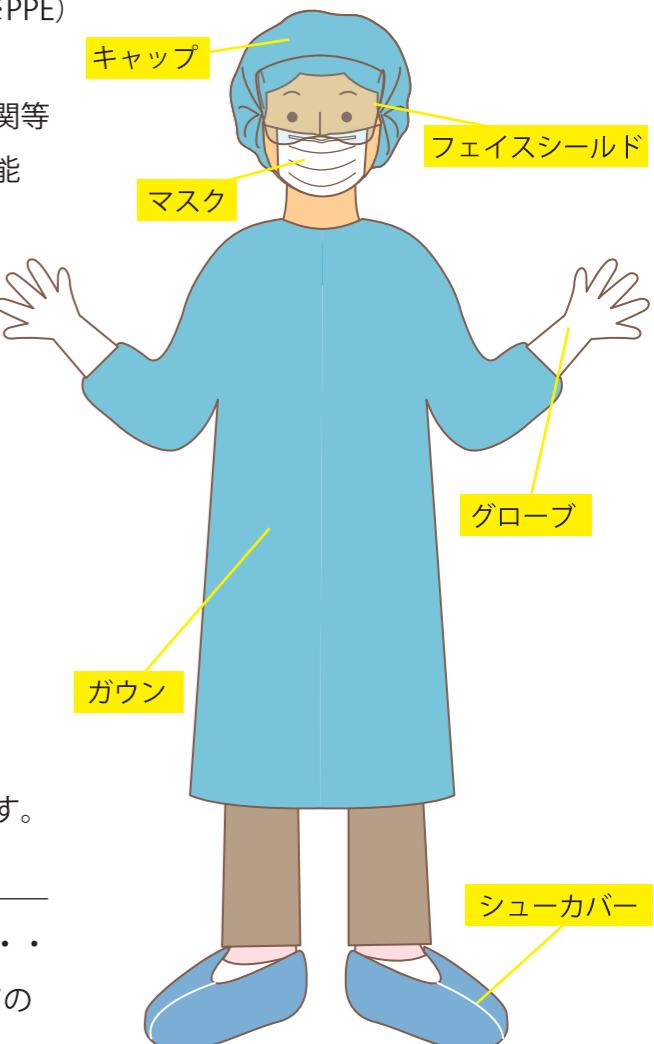

### ●防護具が入っているパッケージは大き目の

A4サイズ袋なので防護具を外した後、空になった袋に入れて安全に廃棄することができます。

※PPE (personal protective equipment) とは・・・  
感染対策が必要な状況において使用する使い捨ての個人防護具のことです。


# 感染防護基本セット着け方

入室前に着用します  
ガウン→マスク→キャップ→シューカバー→グローブ



## ■はじめに

袋から防護具を取り出しアルコール消毒液やアルコール含浸カット綿等で手指の消毒をする。


※空になった袋は、防護具を外した時に廃棄袋として利用できます。

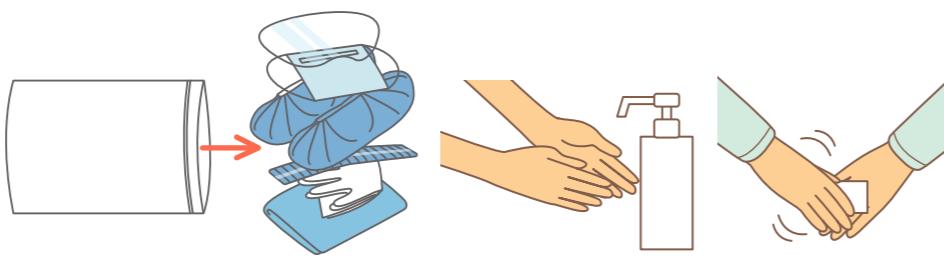

## 1 ガウン

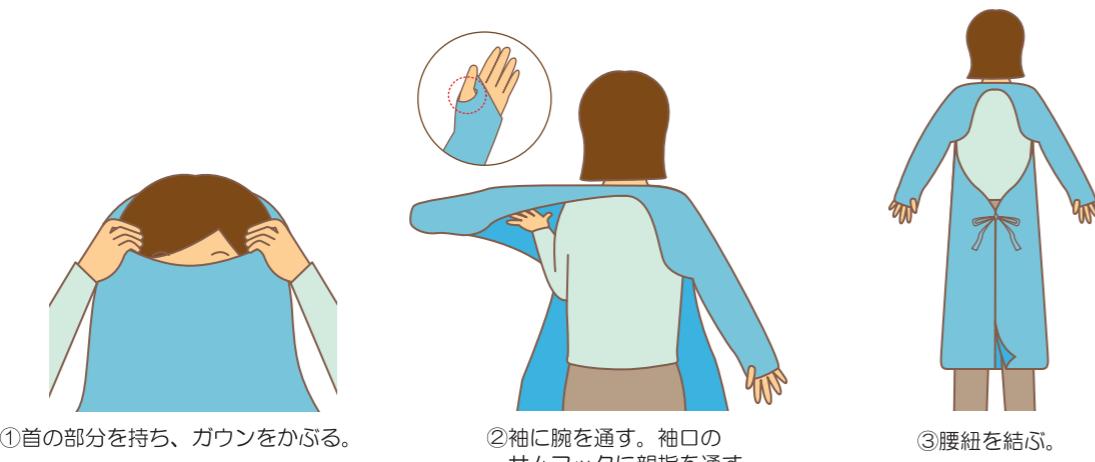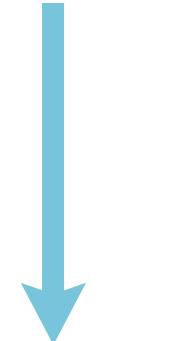


①首の部分を持ち、ガウンをかぶる。

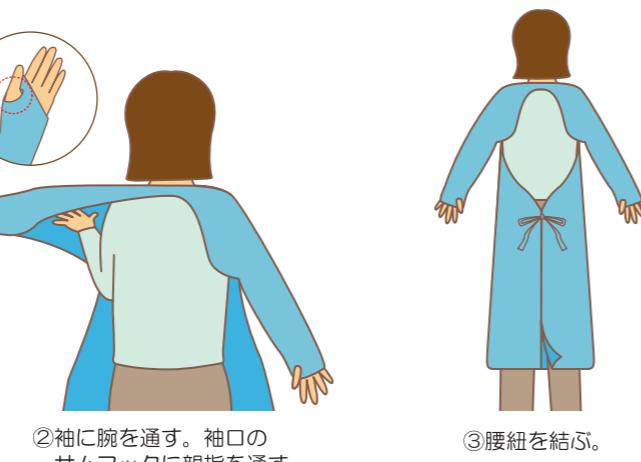


②袖に腕を通す。袖口のサムフックに親指を通す。

③腰紐を結ぶ。

## 2 マスク

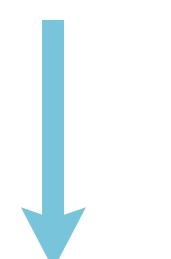



①マスクをつけ、シールドの折り目を折る。

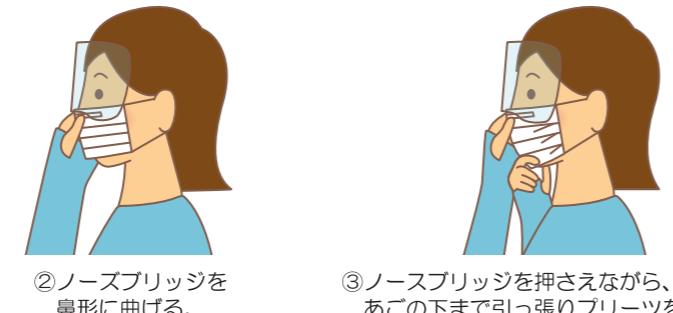

②ノーズブリッジを鼻形に曲げる。

③ノーズブリッジを押さえながら、マスクをあごの下まで引っ張りプリーツを伸ばす。

## 3 キャップ

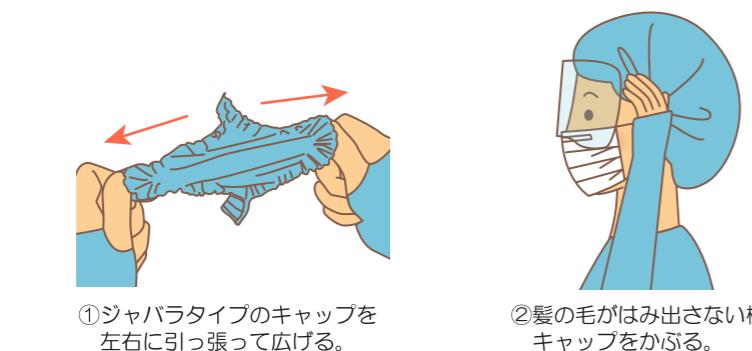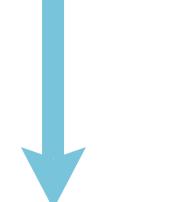

①ジャバラタイプのキャップを左右に引っ張って広げる。

②髪の毛がはみ出さない様にキャップをかぶる。

## 4 シューカバー



足をシューカバーで覆う。

## 5 グローブ



手首が露出しないように  
ガウンに被せます。

指の先までしっかりと  
グローブをはめる。

# 感染防護基本セット外し方


退室前に外します

グローブ→シューカバー→ガウン→キャップ→マスク


⚠ 外す際は表面（汚染面）に触れないでください。

（防護具が入っていた袋を利用します）


## 1 グローブ

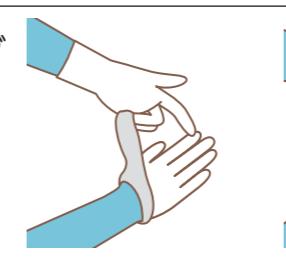


①片方の手袋の外側（汚染面）の端をつまむ。

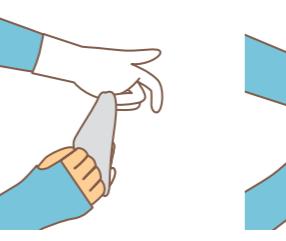

②内側が外に出るように引っ張りながら外す。

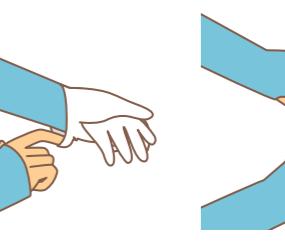

③手袋を外した手で、もう一方の手袋の内側に手を差し入れる。

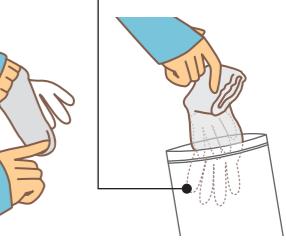

④内側が外に出るように引っ張り外す。⑤汚染面に触れないように袋に入れる。

## 2 シューカバー



①シューカバーに手を差し込み外す。




②外側（汚染面）と内側をひっくり返す。




③汚染面に触れないように袋に入れる。


## 3 ガウン

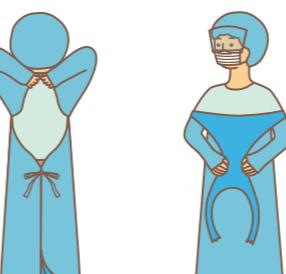

①背中側から首の部分を持つ。

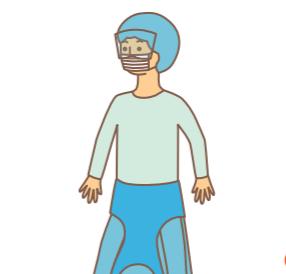

②そのまま引っ張り首の輪を切る。

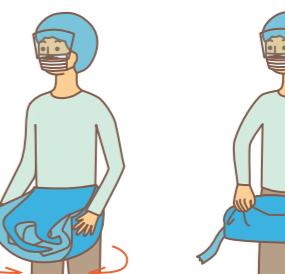

③ガウンの表面（汚染面）が重なるように垂らす。



④ガウン表面に触れないように腰紐を引つ張り、腰紐を切る。⑤汚染面に触れないように袋に入れる。

## 4 キャップ




①キャップに手を差し込む。



②キャップを持ち上げ外す。



③外側（汚染面）と内側をひっくり返す。

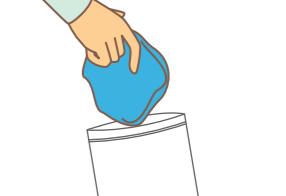

④汚染面に触れないように袋に入れる。

## 5 マスク



①ゴムを持ち、マスク前面に触れないよう外す。



②肌に触れていた面が外側になるように折る。



③汚染面に触れないように袋に入れる。

## ■さいごに

アルコール消毒液やアルコール含浸カット綿等で手指の消毒をする。袋にアルコール含浸カット綿等を入れて閉じ、廃棄する。

