

## スワンリバーシブルマットレスの使用方法と注意点

### 【特徴】

- ・内部素材に環境に優しい天然ゴムを使用しています。
- ・表面素材特殊フィルム（抗菌・透湿性・防水性）を使用。医療現場の消毒剤に対応。
- ・マットレス内部の『H』構造が・体圧分散効果・安定性を高めました。
- ・ソフト・ハードの2層構造になっており用途に応じて両面御試用いただけます。
- ・失禁等汚染されても浸透することなく、清拭行為により清潔を保持します。

### 【使用方法】

- ・ベッドの上に直接敷いて御使用ください。（スワンsk1の場合はマットレス上に直接敷いて御使用ください）
- ・通常マットレスの上にシーツのみで御使用いただけます。（発汗の多い方や尿漏れ等頻回な方は、当社専用シーツ、汗取りパット等併用してください。）

### 【清拭方法】

- ・表面が汚染されたら、中性洗剤等で拭き取ってください。
- ・感染症の方が御使用された場合は、症状に応じた消毒洗浄剤で拭き取ってください。  
アルコール、次亜塩素酸ナトリウム使用可  
※服用されている薬剤等により清拭されましても、フィルムに色素が残る場合がありますが、消毒効果や清拭面に問題はありません。

### 【補修】

- ・フィルムが損傷したら、当社専用補修テープを御使用ください。

### 【注意点】

- ・防水シーツ（ポリビニール、プラスチック等）の併用はしないでください。