

当社独自の乗せかえ装置付ストレッチャーがさらに機能アップして洗練されたスタイルで登場!!

# 乗せかえ装置付ストレッチャー

HS-200

HS-250

HS-500

わたくしたちは  
やわらかなハートで  
つくります。

いうら独自の繰り出しベルトを使用した、乗せかえ装置付のストレッチャーです。簡単操作で、ベッドから本体への移載をスムーズに行うことができます。

介護労働者設備等整備モデル奨励金対象機種

## 背上げ機能

レバーを軽く握るだけで背上げができます。角度は水平から45°まで無段階に調整できます。座面は左右どちらも背上げができますから、ベッドに寝ている方の頭位置に関係なく乗せかえできます。(HS-200・250・500)

## 繰り出しベルトカバー

繰り出しベルトカバーを全機種に標準装備しています。丈夫で破れにくい素材を採用し、クッション性も良好です。



写真はHS-250、オプション装備

2輪同時にロックできます。介護者がどの立ち位置からでも操作できます。

## 繰り出しベルトの操作説明



1 ご利用者の背中がストレッチャーに向くように寝返りさせます。



2 ハンドルを回して繰り出しベルトを送り出します。



3 繰り出しベルトを身体の下に敷き込みます。



4 身体を仰向けにし、ベルトの上に乗せます。



5 身体を支えながら繰り出しベルトがストレッチャーの中央にくるまで巻き取ります。



写真はHS-250オプション装備

ハンドルで昇降するストレッチャーです。独自の昇降機能により静かで安定性の高い操作環境を実現しました。ハンドルを右に回すと上昇し、左に回すと下降する簡単な操作です。クッション性の良い繰り出しベルトカバーを標準装備しています。



●乗せかえ装置付ストレッチャー

**HS-250**

税込価格 451,500円 (本体価格 430,000円)

全長	1,850mm (座面水平時)
全幅	655mm
座面幅	550mm
座面高(ボトム下面)	490~895mm
フレーム高	166mm
重量	50kg (オプション除く)
耐荷重	100kg

背受け角度/0~45°まで無段階調整(ガスシリンダー方式)  
キャスター径/125mm  
主要材質 スチール、レザ

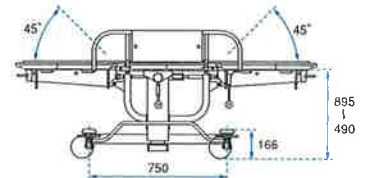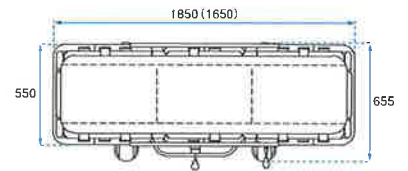

( )内の寸法はHS-200

**HS-200**

税込価格 430,500円 (本体価格 410,000円)

全長	1,650mm (座面水平時)
全幅	655mm
座面幅	550mm
座面高(ボトム下面)	490~895mm
フレーム高	166mm
重量	48kg (オプション除く)
耐荷重	100kg

背受け角度/0~45°まで無段階調整(ガスシリンダー方式)  
キャスター径/125mm  
主要材質 スチール、レザ



写真はHS-500オプション装備

電動昇降で介護負担を大きく軽減します。下降時にボトムがベッドなどに当たると、スイッチを押しつつけても下降しない安全設計です。



●乗せかえ装置付電動ストレッチャー

**HS-500**

税込価格 766,500円 (本体価格 730,000円)

全長	1,850mm (座面水平時)
全幅	655mm
座面幅	550mm
座面高(ボトム下面)	495~895mm
フレーム高	166mm
重量	58kg (オプション除く)
耐荷重	100kg

角度調節/0~45°まで無段階調整(ガスシリンダー方式)  
キャスター径/125mm  
主要材質 スチール、レザ

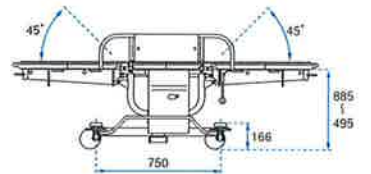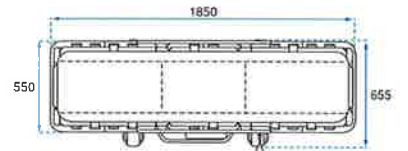

バッテリー 仕様 (12V・7Ah)  
AC100V/フル充電約8時間/90kg負荷で約100回昇降可

■交換用バッテリー ..... ¥10,290 (¥9,800)

一目でわかるバッテリーチェック



チェックボタンを押して要充電のランプがついた時には、予備のバッテリーと交換し、専用充電器で充電してください。



●点滴取付台 ¥10,500 (¥10,000)



●カゴ ¥18,900 (¥18,000)



●マクラ ¥8,400 (¥8,000)



●ポンペ取付台 ¥6,300 (¥6,000)  
(ポンペ取付台は直径105mm、500Lの酸素ボンベに対応しています。)



本社・松山営業所 / 〒791-0214 愛媛県東温市南野田410番地6  
TEL089 (964) 7770 FAX089 (964) 1522  
仙台営業所 / TEL022 (390) 4605 FAX022 (288) 3690  
東京営業所 / TEL03 (5248) 2541 FAX03 (5248) 2542  
名古屋営業所 / TEL0568 (42) 6015 FAX0568 (71) 9656  
大阪営業所 / TEL072 (641) 8711 FAX072 (641) 8712  
福岡営業所 / TEL0942 (45) 3808 FAX0942 (45) 3809  
北海道エリア / 〒064-0919 北海道札幌市中央区南十九条西6丁目3番5号  
特約店 エア・ウォーター・ハローサポート株式会社  
TEL011 (531) 1315 FAX011 (531) 1346

ホームページもご覧ください!  
動画配信

いちら 検索  
メールアドレス info@iura.co.jp

お取り扱い

※カタログ記載の価格はいずれもメーカー希望小売価格です。  
※価格、仕様は予告なく変更する場合があります。※詳細は各営業所にお問い合わせください。