


# 取り扱い説明書

## ささえ【普通型】家庭用木製ベッド

ささえは家庭用ベッドに木ネジ8本で固定すればすぐ使える簡単で便利な手すりですが  
「ベッドの種類」「取付け場所」等で、必ず守って載きたい点があります。

(下記) 単なる布団の落下防止ではなく、起き上がりの為の手すりです。時には介護の方の手をお借りする等、安全には充分注意して日々快適にお過ごし下さい。

- ・ささえは起き上がりの為の手すりです。マニュアル通り確実にお取付け下さい。  
説明書に無い使い方は危険ですから絶対にしないで下さい。

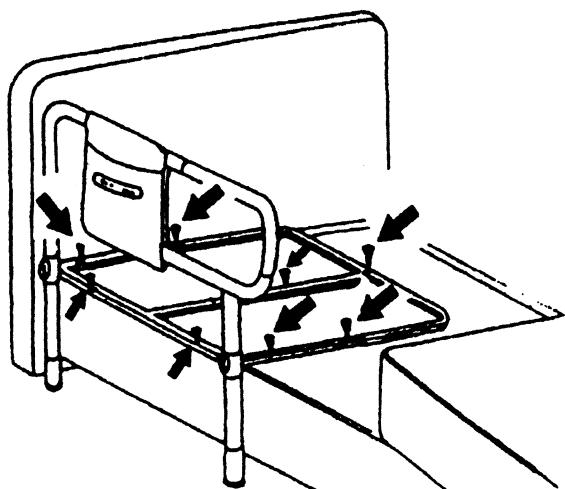

▲木ネジで必ず固定してください。  
(軟らかい(薄い)板は不可)

### ◆この箱の内用品

本体 … 手すり  
ベース … 底板に固定して本体を支える部分  
ベリーバッグ … 新聞、眼鏡、薬等が入るバッグ  
ゴム足 … 2ヶ  
木ネジ … 8本、ベース固定用

### ◆ベッド各部の名称


ヘッドボード…ベッドの頭の方に有る板状の部分  
サイドレール…ベッド左右の板の部分（側板）  
ボトム…マットレスを乗せている板（底板）

両面共、必ず読んで下さい !!


# 【ささえ普通型】の取付け方

両面共、読んで【ささえ普通型】の商品特性を良くご理解下さって確実な取付けをお願いいたします。


## ① より安全の為のお薦め ◆取付け可能なベッド

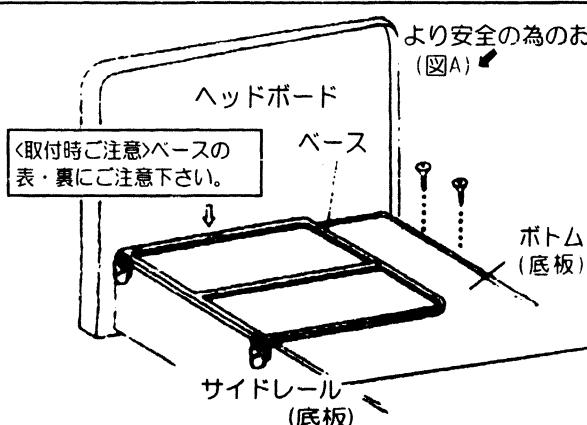

- 木製ベッドで側板と底板が平らなもの
- 底板に木ネジで固定が可能なもの
- 床からマット上迄の高さ約38~50センチ位

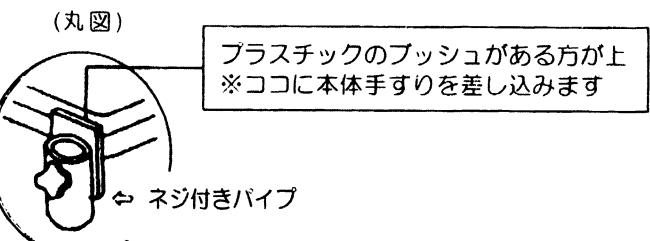

## ③ ベンリーバッグ

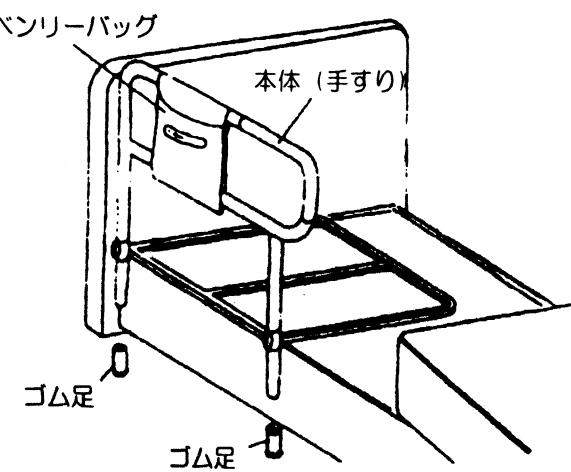


## ◆組立て取付け方

- ①マットをずらし底板の上にベースを置きます。
- ②ベースを側板にピッタリ寄せます。  
(ネジ付きパイプにプラスチックの  
(丸図)ブッシュの付いた方が上)
- ← ③本体(手すり)をベースのネジ付きパイプに  
垂直に差し込んで下さい。(2本を平均に)
- ← ④ゴム足をパイプの下までしっかりと差込んで下さい。

## ⑤

## ⑥

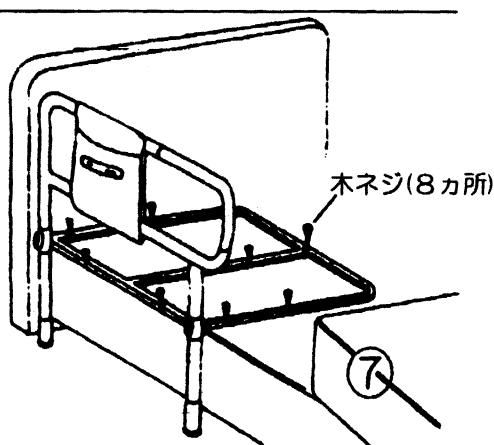

※右側、左側共、取付け要領は一緒です。

ベンリーバッグも使い勝手にあわせて内側、外側自由にお使い戴けます。

## ※より安全の為のお薦め(図A)


より安全の為に底板を側板に木ネジ等で固定される事をお薦めします。但し構造上出来ないベッドも有ります。

(イラスト①②の(図A)の部分です)

- ← ⑤もう一度、ベースが側板にピッタリ寄せてある事を確認してから木ネジ8本で底板にシッカリ固定します。
- ← ⑥本体(手すり)を、ゴム足がピッタリ床に着くまで押し下げてからネジ付パイプのネジを締めてしっかりと固定して下さい。
- ← ⑦マットレスをもとに戻してご使用下さい。

## ◆底板と側板に段差のあるベッドには取付けられません

### (図B)

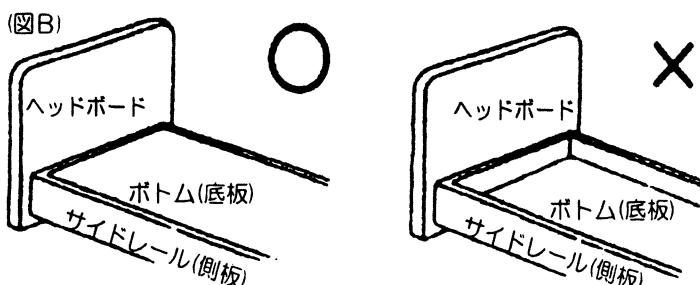

側板と底板が平らならば  
取付けは可。

底板が側板より低い  
ベッドは取付け不可。

※組立て、ご使用に当たってご不明な点が  
有りましたら必ず下記までお問い合わせ下さい。

■ 03-3805-3544 (代) FAX 03-3805-3543

9:00 ~ 17:00 (土日祝日休)

(株)吉野商会

両面共、必ず読んで下さい !!